

## Test delle Proteine Residue

- Conforme alla normativa EN ISO 15883
- Risultati disponibili in 10 secondi
- Facilità di utilizzo – **non richiede incubazione** –
- Cambio di colore evidente
- Da utilizzare per verifica su:
  - Strumenti chirurgici
  - Superfici metalliche di lavaferri e macchinari ad ultrasuoni



## Test delle Proteine Residue

Il Test delle Proteine Residue è un test rapido in grado di rilevare residui di proteine sulle superfici di dispositivi di lavaggio e disinfezione, sistemi di lavaggio ad ultrasuoni e altri strumentari chirurgici di difficile pulizia. Questo test per le proteine si serve di una soluzione a reazione colorimetrica (dye-binding) utilizzata in chimica clinica e permette di rilevare residui di proteine fino a 1 µg.

**Come ordinare**

### PS1700

Test delle Proteine Residue


**Conf. da 25 fiale & 25 tamponi corti**

## Test delle Proteine Residue

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Nome:</b>	Test delle Proteine Residue
<b>Conformità:</b>	EN ISO 15883, HTM 2030
<b>Tempo:</b>	Risultati in 10 secondi
<b>Condizioni di stoccaggio:</b>	Luogo refrigerato (4°C)
<b>Lotto:</b>	sì
<b>Data di scadenza:</b>	sì
<b>Simboli:</b>	sì, secondo gli standard
<b>Indicatore:</b>	Fiala per test colorimetrico (dye-binding)
<b>Validità:</b>	6 mesi non refrigerato, 24 mesi refrigerato
<b>Confezionamento:</b>	25 test per confezione, compresi i tamponi. Tamponi extra più lunghi su richiesta. Comprende 2 test di controllo.

Per determinare se sono presenti proteine sulle superfici, tamponare e posizionare il tampone nella soluzione di viraggio, girandolo per 5 secondi. Quindi rimuovere il tampone. Se le proteine sono presenti, il reagente virerà entro 10 secondi. Il viraggio fornisce una misurazione semiquantitativa della pulizia della superficie; maggiore è il livello di contaminazione da proteina (per esempio da carica batterica), più rapido ed intenso sarà il viraggio verso il blu.

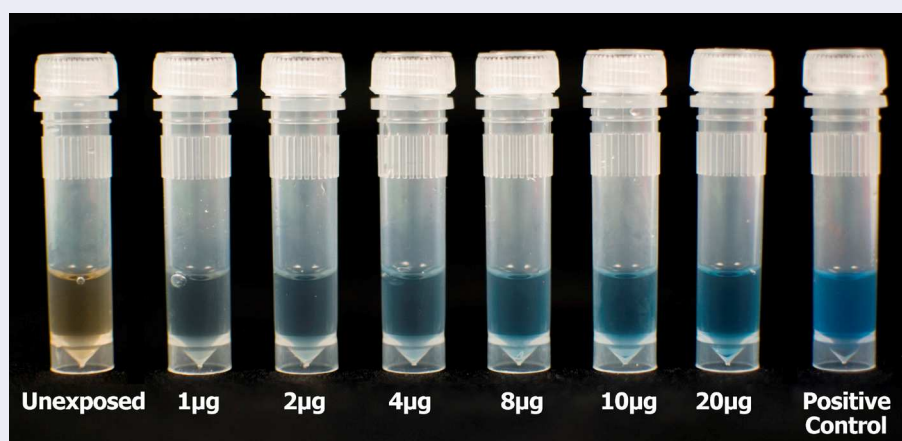

Distribuito in Italia da:



Via dei Lapidari, 3 – 40129 Bologna T) 051 327911 – 326888 F) 051 327905 - 326325

Address: Squirrels | Kithurst Park |  
Storrington | West Sussex | RH20 4JH | England  
Tel: +44 (0) 1903 741390

Warehouse Address: Units B10/B11  
Oakendene Estate | Bolney Road | Cowfold  
West Sussex | RH13 8AZ | England