

## Seal Sure

- Test di routine per sigillatrici
- Conforme alla norma EN ISO 11607-2 2006
- Registra: tempo, temperatura e pressione di sigillatura
- Facilità di interpretazione



## Seal Sure

- ParaSure Seal Sure viene utilizzato per il monitoraggio di routine delle sigillatrici e per la verifica dei requisiti operativi secondo la norma EN ISO 11607-2 2006.

Verifica se il punto di sigillatura ottimale è rispettato da parte della sigillatrice a caldo, monitorando tempo, temperatura e pressione della sigillatura.

In base alla norma EN ISO 11607-2 2006 la zona di saldatura deve:

1. Essere integra per una determinata larghezza della sigillatura stessa
2. Essere priva di pieghe/venature o aperture lungo la sigillatura
3. Essere priva di fori o strappi
4. Il materiale non deve presentare rigonfiamenti o distaccamenti

ParaSure Seal Sure assicura che tutte queste specifiche siano rispettate evitando quindi una verifica soggettiva (es. sulla sola base di una verifica visiva) della zona di saldatura, escludendo qualsiasi possibilità di errore umano.

Il test viene eseguito quotidianamente ad inizio giornata e registrato insieme agli altri dati afferenti alla centrale di sterilizzazione.

Come ordinare

## PS2100

Seal Sure

Confezione da 250 pz



be sure ...  
be ParaSure


## Seal Sure

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Nome	Seal Sure
Classificazione	EN-ISO 11607-2 2006
Simboli	secondo la norma EN-ISO 11607-2 2006
Monouso	sì
Atossico/Senza piombo	sì
<b>Dati per la registrazione:</b>	
Sigillatrice	sì
Luogo	sì
Per approvazione	sì
Data	sì
Note	sì
Validità	5 anni

PS 21.00	Sealing Machine	Location	For Approval	Date	Remarks
----------	-----------------	----------	--------------	------	---------

Please put this test sheet into your pouch and pass it through the sealer once. The seal must be darker than the environment throughout.



## PARASURE SEAL SURE

Parasure Ltd  
Unit B10/B11 Oakendene Estate  
www.parasure.co.uk

Bolney Rd  
Cowfold  
West Sussex  
RH13 8AZ  
Tel: +44 1903 741300

Distribuito in Italia da:



Via dei Lapidari, 3 – 40129 Bologna T) 051 327911 – 326888 F) 051 327905 - 326325

Address: Squirrels | Kithurst Park |  
Storrington | West Sussex | RH20 4JH | England  
Tel: +44 (0) 1903 741390

Warehouse Address: Units B10/B11  
Oakendene Estate | Bolney Road | Cowfold  
West Sussex | RH13 8AZ | England